

MEDAPRINT FOAM®

Αφρός απολύμανσης οδοντιατρικών αποτυπωμάτων

Το MEDAPRINT FOAM είναι ένα συμπυκνωμένο διάλυμα καθαρισμού και απολύμανσης των οδοντιατρικών αποτυπωμάτων. Η μορφή του σε αφρό επιτρέπει μια ευκολότερη χρήση και καλύτερη ακρίβεια στην εφαρμογή.

Η ειδική του σύνθεση παρουσιάζει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα δράσης χωρίς να αλλοιώνει τις διαστάσεις των αποτυπωτικών υλικών.

Ιδιότητες

- Μορφή αφρού για εύκολη και ακριβή εφαρμογή
- Ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα δράσης σε 15 λεπτά
- Συμβατό με αποτυπώματα από αλγινικό, σιλικόνη, πολυαιθέρα και υδροκολλοειδές
- Αφαιρεί δραστικά τα οργανικά κατάλοιπα
- Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο
- Ιοκτόνο κατά των ιών με περίβλημα (HBV, HIV, HCV, Herpes, Vaccinia, BVDV, influenza, Ebola, Coronavirus...)
- Δεν περιέχει φαινόλες, αλδεΐδες, χλώριο, ή EDTA

Απολυμαντικές Ιδιότητες

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (1% αραιώση)	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΣΤΕΛΕΧΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	5 Λεπτά
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13624	Candida Albicans	5 Λεπτά
ΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	DVV ⁽¹⁾ /RKI ⁽²⁾ 2014	BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus	2 Λεπτά
ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	Mycobacterium Terrae (Αναπληρ. M. tuberculosis)	15 Λεπτά
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	Mycobacterium Terrae Mycobacterium Avium	15 Λεπτά

(1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (German Association for the Control of Virus Diseases)

(2) RKI: Robert Koch Institute - German Federal Health Authority

Πιστοποιήσεις

- Σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (οδηγία 93/42/EEC)
- Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIb

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκευθείτε το www.medalkan.gr

MEDALKAN - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΠΕ - Μιχαλακοπούλου 102, 115-28 Αθήνα - Τηλ: 210-7484847 - Fax: 210-7772009 - www.medalkan.gr - contact@medalkan.gr



Συσκευασία

- Φιάλη ενός λίτρου με ψεκαστήρα (Κωδ. 20035)

Φυσικές Ιδιότητες

- Εμφάνιση: Διαφανές αφρός
- Πυκνότητα: 0.99 g/cm³ στους 20°C
- pH: 9.5-10.5 στους 20°C
- Οσμή: Ουδέτερη
- Διατήρηση: 5°C - 35°C
- Σταθερότητα: 3 Έτη
- Βιοδιασπασιμότητα: Σύμφωνα με την OCDE 301D

Οδηγίες χρήσης

Ψεκάστε το MEDAPRINT FOAM ομοιόμορφα για να εξασφαλιστεί η πλήρης διαβροχή των αποτυπωμάτων. Αφήστε το προϊόν να δράσει ανάλογα με το επιθυμητό φάσμα δράσης (τουλάχιστον για δύο λεπτά).

Ξεπλύνετε τα αποτυπώματα καλά με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τα με ένα χαρτί μιας χρήσης. Το οδοντιατρικό σας αποτύπωμα είναι καθαρό και απολυμασμένο.


Μην αναμειγνύετε με άλλα απολυμαντικά προϊόντα.
Αποθηκεύστε το προϊόν μεταξύ +5°C και +35°C.



Medalkan
HYGIENE & DISINFECTION

MEDAPRINT FOAM®

Αφρός απολύμανσης
οδοντιατρικών αποτυπωμάτων

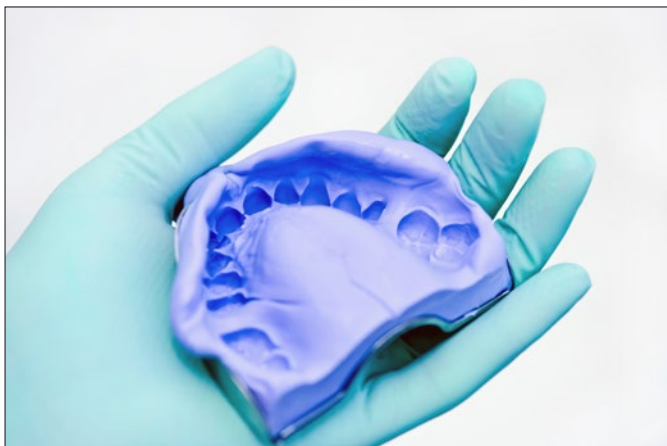

Συμβατότητα

Το MEDAPRINT FOAM είναι συμβατό με αποτυπώματα από αλγινικό, σιλικόνη, πολυαιθέρα και υδροκολλοειδές. Δεν είναι συμβατό με απολυμαντικά παρασκευάσματα που περιέχουν αλδεΐδες.

Συστατικά

N-(3-αμινοπροπυλο)-N δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη
< 5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, αμίνες, αναστολέας διάβρωσης, διαβρεκτικό παράγοντα, έκδοχα.

Το MEDAPRINT FOAM παρασκευάζεται στην Ελλάδα.

Η **MEDALKAN** τηρεί τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 που αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

